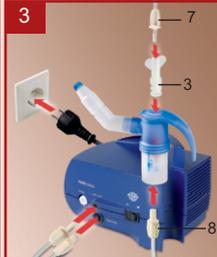


Guía Rápida: Inhalación con PARI SINUS

Por favor, lea las Instrucciones de uso que se proveen con el nebulizador y el compresor, en donde encontrará una descripción más detallada.

Si extravió las Instrucciones de uso, puede bajarlas desde www.pari.de/en o solicítelas a ROCIMEX SRL.

			
<p>Lave sus manos antes de cada uso.</p>	<p>Conecte el nebulizador, el codo y el conector nasal.</p>	<p>Coloque la solución inhalable y cierre.</p>	<p>Coloque el conector vibratorio (3) al nebulizador e inserte tubo de bolo (7). Conecte el nebulizador al compresor mediante la tubuladura (8).</p>

			
<p>Sientese derecho y relájese. Bloquee un orificio nasal con el tapón. Inserte el nebulizador en el otro orificio nasal. Encienda el compresor.</p>	<p>Cierre el paladar blando. Presione la lengua contra el techo del paladar (como pronunciando la letra K). Mantenga la respiración durante 10 seg.; luego tómesese un momento para respirar. Repita la acción para reanudar el tratamiento.</p>	<p>Pasado la mitad del tiempo de inhalación cambie de orificio nasal y continúe el tratamiento como se describe en la figura 4b.</p>	<p>Luego de completar la inhalación, apague el compresor y desconecte los tubos del nebulizador. Para secar los tubos, encienda el dispositivo y coloque los cables en dirección hacia el piso, sin el nebulizador.</p>

Guía rápida: Higiene and y mantenimiento del nebulizador PARI SINUS

Por favor, lea las Instrucciones de uso que se proveen con el nebulizador y el compresor, en donde encontrará una descripción más detallada.

Si extravió las Instrucciones de uso, puede bajarlas desde www.pari.de/en o solicítelas a ROCIMEX SRL.

Por favor, lleve a cabo las siguientes acciones luego de cada uso

 <ul style="list-style-type: none"> ■ Desarme el nebulizador. ■ Lave con agua corriente tibia y detergente, y enjuague. 	 <p>Disinfección</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Hierva en agua durante 5 minutos. o ■ en un esterilizador (por ej. de mamaderas). 	 <p>Secado</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Coloque los componentes sobre una tela seca sin pelusa. ■ Cuando estén completamente secos, guardelos en un lugar libre de polvo y humedad.
 <p>Mantenimiento: al menos una vez al año deberá reemplazar el filtro de aire, nebulizador y tubos conectores. Los mismos están incluidos en el PARI Sprint SINUS® Year Pack, el cual tiene disponible su distribuidor de PARI. Si los componentes se dañaran o contaminaran deberán reemplazarse antes.</p>		

© PARI GmbH - Spezialisten für effektive Inhalation - 028D0018-B-10/2012

Rocimex SRL

Potosí 3964 (C1199ACF) CABA - Tel/Fax: 4983-9239
info@rocimex.com.ar - www.rocimex.com.ar

Specialists in effective inhalation **PARI**

CE 0123  PARI GmbH
 Moosstrasse 3 • 82319 Starnberg • Alemania
 Tel.: +49 (0) 8151-279 0 • Fax: (0) 8151-279 101
 E-Mail: info@pari.de